

電気磁気ユニット  
よくいただくご質問

- **なぜ1日3回ですか？それより多く使用した場合の影響はありますか？**
  - 個々に違いはありますが、3回程度をご利用いただくのがこれまでの人での経験上、良いと考えています。多く利用する分には問題はありません。
- **使い始めは何分くらいから慣らしていくのがよいですか？**
  - 10分程度から慣らしていき、様子を見ながら1回30分をお勧めしています
- **磁気ユニットを人間が使っても大丈夫ですか？**
  - 全く問題ございません。
- **電気カーペットや床暖房の上で使用しても問題はありますか？**
  - 特に問題ございませんが、磁気ユニットが熱を持ちヒューズによって自動的に使えなくなる場合がございます。温度上昇には十分ご注意ください。
- **寝る前に使用しても睡眠に影響はありますか？**
  - 磁気ユニットは、副交感神経優位の状態にすることでリラックスし、より快適な睡眠をサポートします。睡眠前に利用することはお勧めです。
- **磁気ユニットをセットしたロイヤルベッドの上に3頭寝ていることがありますが、3頭とも効き目がありますか？**
  - 付属の磁気テスターの磁石が動く範囲に磁気の影響があります。その範囲にいれば磁気が届いています。
- **大型犬の場合は、30分よりも長い時間使用した方がよいですか？**
  - 長時間ご利用いただくことで、より健康サポートを推進できますが、大きなワンちゃんでも30分でも十分血流サポートができると考えています。
- **体重2kg未満ですが、30分は長すぎますか？**
  - 10分程度からお試しいただき、様子を見ながら1回30分にすることをお勧めしています。
- **術後すぐに使用しても問題はありますか？**
  - 手術の種類にもよりますが、基本的には問題ございません。むしろ術後の早期回復のサポートとして磁気ユニットをお勧めします。
- **磁気ユニットを使用する理想的な時間帯はありますか？**
  - 夜間寝ているときが一番のお勧めです。
- **朝起きてすぐに使用しても問題はありますか？**
  - 問題ございません。
- **夏は使用しない方がよいのですか？**
  - 使用しない方がよい時期はございません。夏場はむしろクーラーのきいた部屋の中にいることが多いと思いますので、夏場もご利用いただくことをお勧めします。
- **マイクロチップを埋め込んであるペットに使用しても問題はありますか？**
  - 問題ございません。磁気ユニットよりも強い磁気 MRI に入ってもマイクロチップに異常がないことをマイクロチップメーカー側に確認しています。

- **骨折等により骨にプレートやボルトを打ちこんでいるペットが使用しても問題はありますか？**
  - 問題ございません。体内に入れるプレートやボルトには鉄など磁気の影響を受けるようなものは含まれていませんので、使用しても問題ございません。ただし、ペースメーカーを入れている人は磁気ユニットの近くには近づかないようにくれぐれもご注意ください。
- **腰痛の場所に直接当てなくても効果はありますか？**
  - 幹部直接当てなくても全身の血流サポートは期待できますが、できればお悩みの場所に直接当ててあげることをお勧めします。
- **仔犬も使用して問題はありますか？**
  - 子犬のころからご利用いただいても問題ございません
- **酸素室の中で使用しても問題はありますか？**
  - 酸素室側の装置に磁気による悪影響が出ないのであればご利用いただいても問題ございません。
- **イメージ写真は磁気ユニットを枕にしている写真ですが、枕として使用するのが効果的なのですか？**
  - 写真はあくまでイメージです。
- **ベッドの中に入れて使うのと、ベッドの上に置いて使うのとではどちらが効果的ですか？**
  - どちらも変わりありません。磁気の影響が届く範囲内であれば変わりません。
- **磁気ユニットは何年くらい使えるものですか？故障したら修理可能ですか？**
  - 10年以上使えます。万が一故障した場合は、メーカーにて修理を承ります。
- **特に病気や関節トラブルが有る分けでもない健康なペットが使用しても意味はないですか？**
  - 意味はなくありません。元気なワンちゃんやネコちゃんでも健康維持のサポートにご活用いただくことをお勧めいたします。
- **アトピーですが使用してもいいですか？**
  - 構いません。むしろお勧めしています。
- **癌ですが使用するとどんな効果が期待できるか？**
  - 病気に対する具体的な効果はお答えできません。
- **門脈シャントのワンちゃんでも使用して問題はありますか？**
  - 問題ございませんが、獣医師にご相談の上ご使用ください。
- **僧帽弁閉鎖不全症ですが使用しても心臓に負担はかかりませんか？**
  - 問題ございませんが、獣医師にご相談の上ご使用ください。
- **てんかん発作がありますが使用して問題ありませんか？**
  - 基本的には問題はございませんが、獣医師とご相談ください。
- **投薬中でも磁気ユニットを使用しても問題はありますか？**
  - 基本的には問題はございませんが、獣医師とご相談ください。
- **狂犬病予防接種をした日に使用しても問題はありますか？**
  - 基本的には問題はございませんが、獣医師とご相談ください。
- **混合ワクチンを打った日に使用しても問題はありますか？**
  - 基本的には問題はございませんが、獣医師とご相談ください。