




Fanimal

電気磁気ユニット

取扱説明書

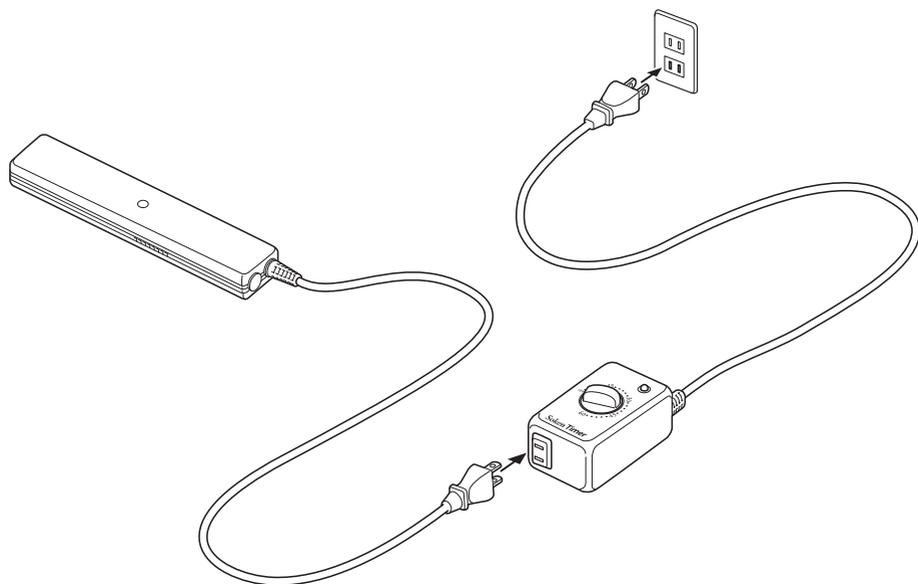

この度は、電気磁気ユニットをご利用いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って安全に正しくお使いください。また、必要なときに本書をいつでも読めるように保管してください。本製品を大切なペットの健康づくりにお役立ていただければ幸いです。

安全上のご注意	2
各部の名称と接続方法	4
ご使用方法	5
アフターサービス	7
仕様	7
保証書	8
お問合せ先	8

安全上のご注意

本製品の誤った取り扱いによる危害や損害を未然に防ぐために、安全上の注意事項を記載してあります。以下の注意事項を守って正しくお使いください。

禁忌・禁止

- 人が死亡または重傷を負う可能性が想定されること

次のような医用電気機器を使用する方の近くでは、絶対に使用しないでください。

本製品が機器に影響を与え、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- 脳脊髄液短絡用圧可変式シャント（頭皮下に埋め込んだ脳脊髄液を腹腔にバイパスする目的で長時間使用し、磁気を利用しパルプ圧を変更可能な医療用具）などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器

注意

- 人やペットが傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定されること

使用前のご注意（使用環境・条件）



水や湿気が多いところで使用しないこと

風呂場などで使用すると、事故や故障の原因になります。



分解・修理・改造をしないこと

故障や事故の原因になります。



電気コードを傷つけないこと

電気コードをペットが噛んだり、引っ張ったり、重いものを載せたりして傷つけると、感電や発火の原因になります。



乱暴に扱わないこと

床に落としたり、コードを持ってぶら下げたりすると、故障の原因になります。



磁気の影響を受けるものを近づけないこと

携帯電話・時計・磁気カード・ICカード・ビデオなどのテープ類・補聴器その他の精密機器を近づけないでください。データの破損や故障の原因になります。



家庭用電源（100V、50/60Hz）を使用すること

指定以外の電源を使用すると、故障や事故の原因になります。

記号の意味



行為を指示する



行為を禁止する



警告・注意を促す

記号の中にある絵は、指示・禁止・注意の具体的な内容を表しています。

注意

- 人やペットが傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定されること

使用中のご注意（使用方法）



1回 30分 1日3回を目安に使用すること

長時間の連続使用は、低温やけどの原因になります。



カバーをつけて使用すること

付属の防水カバーを付け、さらにビニル袋などに入れてください。万一、ペットの排泄物等がかかると、故障や事故の原因になります。



テスターでタイマーの動作を確認すること

タイマーを回したら、テスターを本体に近づけて磁気の発生を確認し、タイマーをOFFにすると磁気が停止することを確認します。



異常を感じたら使用しないこと

すぐに使用を中止して、電源コンセントから差込プラグを抜いてください。



電気コードを束ねたまま使用しないこと

電気コードが高温になり発火の原因になります。



お子様だけで使用させないこと

差込口に異物を入れて感電するなど事故の原因になります。

使用後のご注意（お手入れ・保管）



電源コンセントから抜いておくこと

使用後は電源コンセントから差込プラグを抜いてください。停電時も抜いてください。



差込プラグや差込口を清潔に保つこと

ホコリや水分が付着していると、火災の原因になります。



適切な場所に保管すること

ホコリや湿気が少なく、高温にならない場所、また、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。




長期間の使用で劣化があるときは使用しないこと


電気コードと本体の接続部にゆるみや亀裂がある、本体表面が変色している、差込プラグの金属部が曲がっていたり焦げ跡がある、コードが変形しているなど、劣化した状態のまま使用すると発火の原因になります。使用を中止して修理をご依頼ください。

各部の名称と接続方法

本製品の各部の名称と接続方法を説明します。下図のとおり、タイマーの電源プラグをコンセントに差し込み、本体をタイマーに接続します。

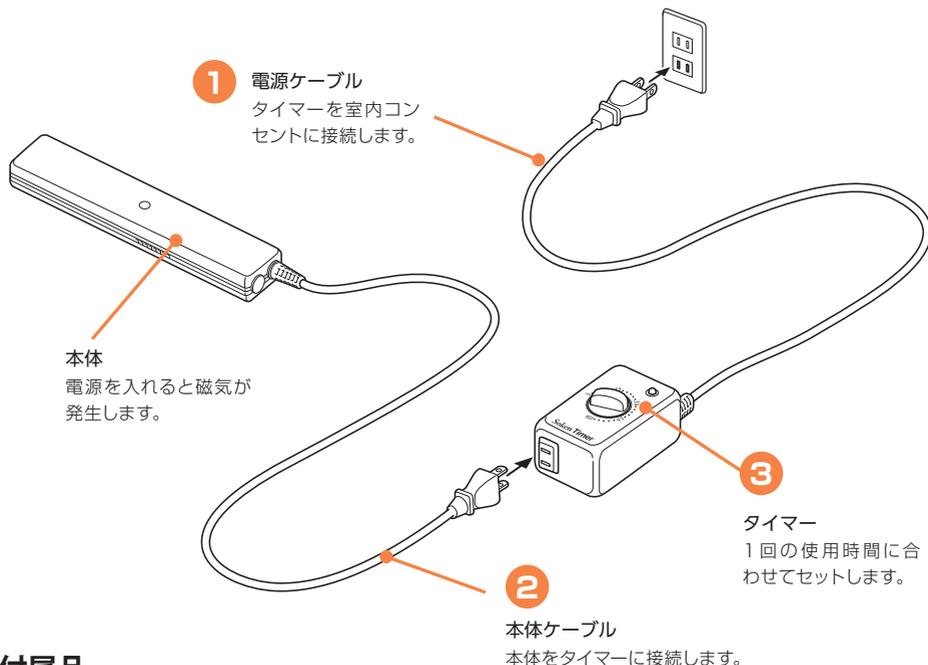


付属品

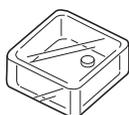

テスター

本体に近づけると、中の磁石が動いて磁気が発生がわかります。

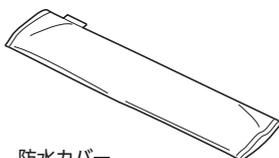

防水カバー

本体を入れて使用します。




取扱説明書（本書）

磁気発生イメージ


電気磁気ユニットから32ミリステラの磁気が発生します。

右図は磁力線のイメージです。

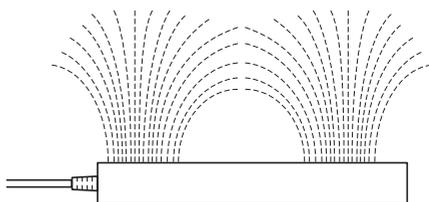

ご使用方法

本製品はタイマーのつまみを回すことにより電源が入り、設定時間になると電源が切れます。すぐに電源を切るときは、つまみを OFF に戻します。

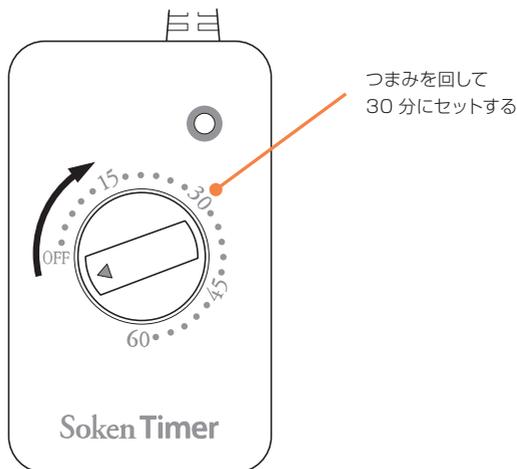

本製品の特長

- 本体から少し離れていても磁気力が届くので、ベッドの下などに置いて使用することができます。
- 1回の使用時間は30分にセットし、1日3回お使いください。

⚠ 注意

- 人やペットが傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定されること



磁気の影響を受けるものを近づけないこと

携帯電話・時計・磁気カード・ICカード・ビデオなどのテープ類・補聴器その他の精密機器を近づけないでください。データの破損や故障の原因になります。



電気コードを傷つけないこと

電気コードをペットが噛んだり、引っ張ったり、重いものを載せたりして傷つけると、感電や発火の原因になります。




カバーをつけて使用すること

付属の防水カバーを付け、さらにビニル袋などに入れてください。万一、ペットの排泄物等がかかると、故障や事故の原因になります。

ロイヤルベッドでのご使用方法

別売のロイヤルベッドと組み合わせてご使用になる方法は、以下のとおりです。

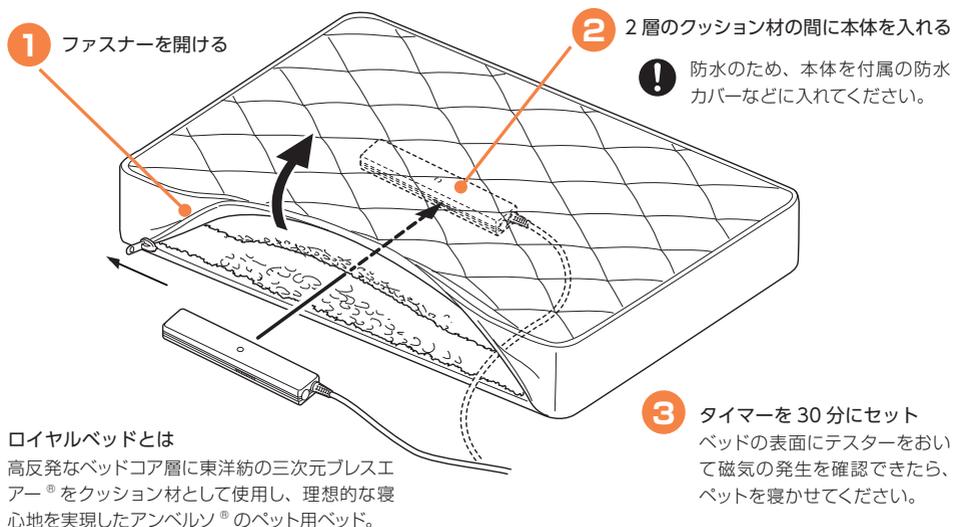

日常のお手入れ（電気磁気ユニット）

- 必ず差込プラグをコンセントから抜き、電源を切ってからお手入れをしてください。
- 水洗いは絶対にしないでください。ショート・感電の原因になります。
- 本体表面やコードの汚れは、やわらかい布を水にひたし固く絞って拭いてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませて拭き、乾いた布でよく拭き取ってください。
- クレンザー、タワシ、ベンジン・アルコールなどの有機溶剤を含むもの、ワックスは使用しないでください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前にご確認ください

症状

磁気が発生しない
(テスターが反応しない)

- 電源コードはコンセントにしっかり差し込まれているか?
- タイマーの差込口にプラグが差し込まれているか?
- 連続使用していないか? (過熱するとサーモスタットが作動して、熱が冷めるまで電源が入りません)
- タイマーは作動しているか?

症状

振動音がる

- 電磁コイルからわずかな振動音が発生することがありますが、異常ではありません。

アフターサービス

修理に関するご相談は、お買い上げ店にお問い合わせください。保証期間内に故障した場合は、保証規定に基づき無償修理しますので、保証書をご提示ください。

保証規定

- 取扱説明書や貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に本製品が故障した場合は、無償修理を行います。
 - 保証期間内であっても次の場合は有償修理になります。
 - ① 使用方法の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天然地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電源周波数）などによる故障および損傷。
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障および損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑦ 故障が本製品以外に起因する場合。
 - ⑧ その他、本書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
 - 保証規定は日本国内においてのみ有効です。
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無償修理対応およびその他の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがって、この保証書においてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

仕様

本体	定格周波数 (Hz)	50Hz	60Hz
	定格電圧 (V)	100V	
	定格容量 (VA)	28VA	24VA
	寸法 (mm)	48 (W) × 250 (D) × 25 (H) ※電源コード除く	
	最大磁束密度 (mT)	34mT	32mT
	消費電力 (W)	2.5W	2.0W
	重量 (g)	650g	
	安全装置	サーモスタット 80℃、温度ヒューズ 115℃	

タイマー	定格周波数 (Hz)	AC 50/60Hz
	入出力電力 (V)	100V
	定格容量 (VA)	AC 125V 3A
	寸法 (mm)	60 (W) 105 (L) × 46 (H) ※突起部除く
	重量 (g)	250g
	定格時間	60分 ± 10分

保証書

正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料修理を行うことをお約束します。
詳細は「保証規定」をお読みください。保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

品名	電気磁気ユニット
製造番号	
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	〒 ご住所 _____
	フリガナ _____
	お名前 _____
	電話 _____
販売店	お買い上げ店名・住所 _____
	電話 _____ 印

株式会社 Fanimal 〒113-0033 東京都文京区本郷 1-21-5 第4太平ビル6階
TEL 03-3868-7788 FAX 03-3868-7789

お問合せ先

販売元

株式会社 Fanimal

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-21-5 第4太平ビル6階

TEL 03-3868-7788 FAX 03-3868-7789

<http://www.fanimal.co.jp/>